



ENVASES DE DESECHOS PUNZOCORTANTE

DESCRIPCION

Los envases para desechar corto punzantes son recipientes especialmente diseñados para la eliminación segura de objetos punzantes o cortantes, como agujas, jeringas, lancetas y cuchillas quirúrgicas. Estos contenedores proporcionan una solución esencial en entornos médicos y de atención de la salud, reduciendo el riesgo de lesiones y la propagación de infecciones.

Normativas Cumplidas



- Cumple con las normativas locales y nacionales para la gestión de desechos médicos y objetos corto punzantes.
- Certificaciones de resistencia a la perforación y hermeticidad.

Garantía



Contamos con Garantía por desperfecto de Fabrica



Manufacturado en **polipropileno** de alta densidad para garantizar el desecho seguro libre de punciones accidentales. Al incinerarse no emite partículas de PVC.



- Cuenta con una gran resistencia mecánica.
- Baja absorción de humedad, por lo que no se daña con el agua.
- Resistencia química, tanto a sustancias ácidas como alcalinas.
- Gran versatilidad, por lo que es compatible con la mayoría de técnicas de procesamiento (lo que le da usos muy diversos).
- Ligereza, ya que es uno de los plásticos con menor densidad.



Características


- Rígido, en polipropileno de alta densidad, un polímero que no contiene P.V.C.
- Recolector para cortopunzantes libre de cloro.
- Resistente a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.
- Con tapa ajustable por presión, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse queda completamente hermético.
- Rotulado de acuerdo a la clase de residuo, y de color rojo (acorde al código de colores estandarizado).
- Tiene una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton.

Tapa con pestañas unidireccionales y sistema de embudo en una sola vía: La tapa con diseño de embudo de válvula de seguridad de una sola vía, evita la salida esporádico del material biológico contenido. Permite el desecho de elementos corto punzantes como: Agujas, bisturí, pericraneales, lancetas, Jeringas, etc.. Impide la salida accidental de los elementos cortopunzantes en caso de caer o voltearse accidentalmente.

Puerto para remover las agujas. Permite remover las agujas de las jeringas con una sola mano.



Tapa con cierre hermético y seguro: Evita la salida accidental del material. Reduce el riesgo de reutilización. Evita la posibilidad de manipulación apática del material contenido.

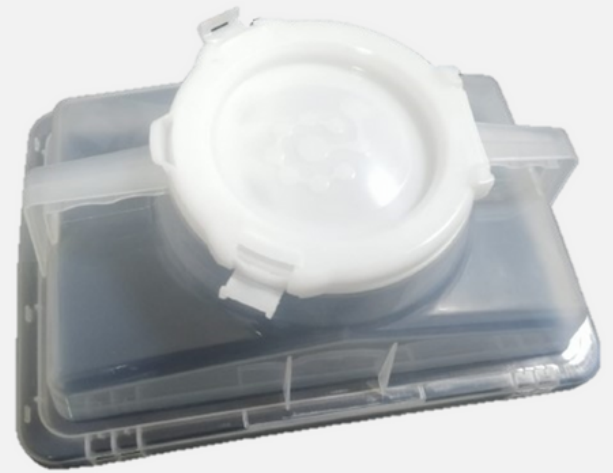

Asas sujetadoras en los extremos: Permiten transportarlo de forma segura una vez alcance el nivel máximo de llenado.



Diseño de Etiqueta

Etiqueta con logo tipo de material biológico. La etiqueta adherida a todos los recolectores tiene reglamentación internacional, diseñada en colores llamativos, facilita a los usuarios la identificación de riesgo con el objetivo de tener mayor control o seguridad.

Nivel Máximo	
CONTENEDOR BIOLÓGICO DE PUNZO CORTANTES	
LOTI 20220415	20220411
<ul style="list-style-type: none">TAPA DE SEGURIDADUN SOLO USOPOLIPROPILENO ESTERILIZANTE E INCINERABLE	<ul style="list-style-type: none">ADVERTENCIAMANIPULAR CON PRECAUCIÓNLLENAR HASTA EL NIVEL INDICADOCERRAR HERMÉTICAMENTE <p>CAPACIDAD: 3,0 Lts.</p>
FABRICADO POR PLASTIONCE S.A.S. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: PLASTIONCE PTY SA. DIRECCIÓN VÍA SIMÓN BOLÍVAR, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, EDIFICIO COSMOPOLITAN TOWER, TORRE 400 APARTAMENTO 12-D, PISO 12. TELEFONOS +57-6024444078 CEL.: +57 314 521 0944	
PELIGRO	
 RIESGO BIOLÓGICO	
Institución: _____	
Origen: _____	
Fecha de Apertura: _____	
Fecha de Recolección: _____	
Responsable: _____	

RECOMENDACIONES DE USO

1

Tape el recolector con la tapa trasparente hacia la parte superior de la etiqueta identificadora de peligro. Presione la tapa sobre el recolector hasta que se oiga el "Clic" y los 8 broches del recolector estén sujetos a la tapa.



2

Tape el recolector con la tapa que dispone de los servicios de descarte de agujas, presionando la tapa contra el recolector hasta que la tapa se encuentre completamente adherida.



3

Después de alcanzar el nivel máximo de llenado, tape el guardián con la sobre tapa colgante. Presione la tapa sobre el recolector hasta que esta oiga el "Clic".



DATOS TECNICOS

ENVASE DE DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 1.4 LITROS



FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1024
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 14 CENTIMETROS DIAMETRO: 13 CENTIMETROS
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	1.4 LITROS
TIEMPO DE USO	4 SEMANAS
PRESENTACION	CAJA MASTER DE 80 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.

DATOS TECNICOS

ENVASE DE DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 3.0 LITROS



FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1021
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 15 CENTIMETROS ANCHO: 17 CENTIMETROS PROFUNDIDAD: 11 CENTIMETRO
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	3.0 LITROS
TIEMPO DE USO	4 SEMANAS
PRESENTACION	CAJA MASTER DE 80 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.



DATOS TECNICOS

ENVASE DE DESECHOS PUNZOCORTANTE DE 7.6 LITROS



FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1033
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 23 CENTIMETROS ANCHO: 22 CENTIMETROS PROFUNDIDAD: 13 CENTIMETROS
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	7.6 LITROS
TIEMPO DE USO	4 SEMANAS
PRESENTACION	CAJA MASTER DE 40 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.

DATOS TECNICOS

ENVASE DE DESECHOS
PUNZOCORTANTE DE
22.7 LITROS

FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1026
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 35 CENTIMETROS ANCHO: 28 CENTIMETROS PROFUNDIDAD: 18 CENTIMETROS
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	22.7 LITROS
TIEMPO DE USO	4 SEMANAS
PRESENTACION	CAJA MASTER DE 17 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.

ANEXOS

Documentos Relacionados

Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

Residuos 1164 de 2002, por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

Esta ficha técnica proporciona información completa sobre los envases para desechar corto punzantes, su importancia en la seguridad en entornos médicos y su cumplimiento con las regulaciones relevantes.



DESCRIPCION

Las bolsas de desechos biológicos son recipientes diseñados específicamente para la recolección, almacenamiento temporal y transporte seguro de materiales biopeligrosos, como productos contaminados con sangre, tejidos, cultivos celulares, y otros desechos médicos o de laboratorio potencialmente infecciosos.

BOLSAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS

Normativas Cumplidas



- Cumplen con las prácticas seguras de recolección, almacenamiento temporal y eliminación final de desechos biomédicos, contribuyendo a la prevención de la propagación de infecciones y la promoción de un entorno de trabajo más seguro.



Garantía

Contamos con Garantía por desperfecto de Fabrica



CARACTERISTICAS TECNICAS



Material

Esta Bolsa es fabricada en Polipropileno que es un material altamente resistente a la penetración y a prueba de fugas.


De color rojo intenso y cuenta con el logo de “**DESECHOS BIOINFECCIOSOS**” para facilitar la identificación de contenido peligroso.



USOS COMUNES



**Hospitales y
Clinicas**

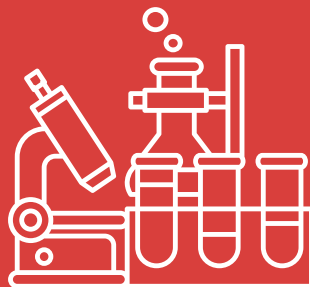

Laboratorios



**Instalaciones
de Atencion**





INSTRUCCIONES DE USO

1

Coloque los materiales biopeligrosos en la bolsa de manera segura, evitando perforaciones.

2

Selle la bolsa de forma hermética.

3

Almacene las bolsas de desechos biológicos en áreas designadas.

4

Etiquete las bolsas con información relevante.

5

Elimine las bolsas de acuerdo con las regulaciones locales para la disposición segura de desechos biológicos.





ADVERTENCIAS



No sobrecargue las bolsas para evitar desgarros.



No reutilice las bolsas una vez llenas.



Mantenga fuera del alcance de niños y personal no autorizado.

OBSERVACION: Las bolsas de desechos biológicos llenas deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Esto a menudo implica la incineración o el tratamiento en instalaciones especializadas.



DATOS TECNICOS

BOLSA DE DESECHOS
BIOLOGICOS 23"X30"

FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1050
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 30 PULGADAS ANCHO: 23 PULGADAS CALIBRE: 2.0
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	RECOMENDACION 3/4 PARTES
TIEMPO DE USO	USO UNICO
PRESENTACION	PAQUETE DE 50 UNIDADES BULTO DE 800 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.

DATOS TECNICOS

BOLSA DE DESECHOS BIOLÓGICOS 32"X40"



FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1051
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 40 PULGADAS ANCHO: 32 PULGADAS CALIBRE: 2.0
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	RECOMENDACION 3/4 PARTES
TIEMPO DE USO	USO UNICO
PRESENTACION	PAQUETE DE 50 UNIDADES BULTO DE 800 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.

DATOS TECNICOS

BOLSA DE DESECHOS
BIOLOGICOS 37"X50"

FABRICANTE	PLASTIONCE S.A.S.
REFERENCIA	1052
MATERIAL	POLIPROPILENO
MEDIDAS	ALTURA: 50 PULGADAS ANCHO: 37 PULGADAS CALIBRE: 2.0
COLOR	ROJO
CAPACIDAD DE LLENADO	RECOMENDACION 3/4 PARTES
TIEMPO DE USO	USO UNICO
PRESENTACION	PAQUETE DE 50 UNIDADES BULTO DE 800 UNIDADES
DATOS DE ALMACENAMIENTO	MANTENGASE EN UN LUGAR PREFERIBLEMENTE LIBRE DE HUMEDAD. NOTA: ES UN PRODUCTO APILABLE

OBSERVACIONES: Este es un producto para usarlo una sola vez, tiene una vida util de 5 años despues de su fabricacion y no requiere registro sanitario.